

Sicherheitshinweise


Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Nutzung des Produktes.
Diese Hinweise dienen Ihrer Sicherheit und dem korrekten Betrieb Ihres Kompressenwärmers.
Nachdem Sie dieses Handbuch gelesen haben, bewahren Sie es bitte für jeden Benutzer des Gerätes jederzeit griffbereit auf.

⊘ Nicht zulässig	Bitte achten Sie darauf, das Netzkabel nicht zu verdrehen und zu beschädigen. Vermeiden Sie es bitte auch, schwere oder scharfkantige Gegenstände auf dem Netzkabel zu platzieren.
⊘ Nicht zulässig	Gerät nur in Gebäuden nutzen. Wenn das Gerät nass geworden ist, kann es einen elektrischen Schlag verursachen!
⊘ Nicht zulässig	Bewahren sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt in der Nähe von Kindern in Betrieb.

⊘ Netzstecker entfernen	Bitte ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen, sondern immer direkt am Stecker, sonst könnten Kabel und/oder Stecker beschädigt werden.
⊘ Nicht mit nassen Händen bedienen	Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen Händen, da Sie sonst einen elektrischen Schlag erleiden könnten.
ⓘ Achtung	Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie starke Erschütterungen, da dies zur Beschädigung oder Zerstörung führen könnte.
ⓘ Achtung	Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird und wenn Sie es reinigen.
ⓘ Achtung	Platzieren Sie die feuchten Kompressen in dem Behälter/Regal innerhalb des Wärmegerätes. Verhindern Sie direkten Kontakt mit der Innenwand, da es sonst zu Verfärbungen kommen kann. Leeren Sie den Wasserauffangbehälter regelmäßig.
⊘ Achtung	Lassen Sie die Kompressen nicht länger als 1 Tag im Gerät, sonst geht die Feuchtigkeit verloren und es entwickeln sich unangenehme Gerüche. Trockene Kompressen sind nicht für die Nutzung geeignet.
⊘ Nicht zulässig	Öffnen und reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern überlassen Sie solche Tätigkeiten professionellem Servicepersonal. Durch fehlerhafte Reparaturen können Schäden an Personen und Gerät entstehen.

Kompressen-Wärmer

Benutzerhandbuch

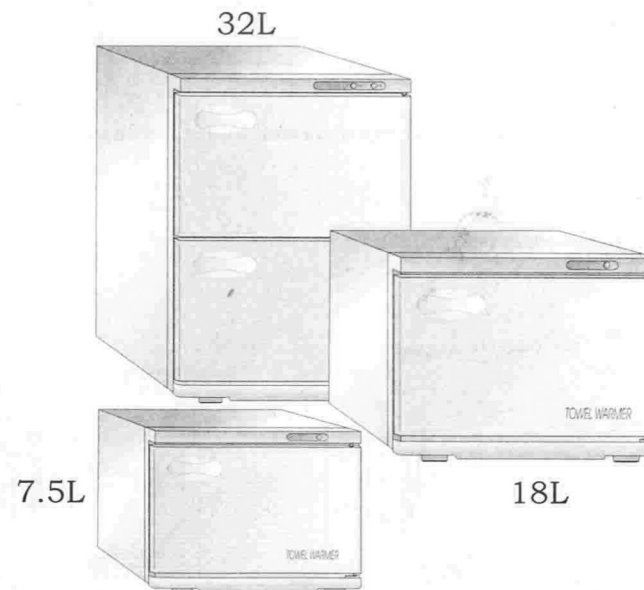


Vielen Dank für den Erwerb unseres Kompressenwärmers. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der ersten Inbetriebnahme und beachten Sie alle Hinweise.

Bedienungsanleitung

Modell	MPR18A-2
Spannung	Wechselspannung 220-240 V 50 Hz
Leistung	250 W
Temp.-Regelung	Bimetall-Thermostat
Innentemp.	70 ~ 80 °C
Sicherheits-schaltung	Sicherheitstemp. 102 °C
Aussenmaße	450x285x355 mm (LBH)
Innenmaße	374x195x250 mm (LBH)
Volumen (Innen)	18 Liter
Isolierung	Glaswolle
Gewicht	6,2 kg
Zubehör	Regaleinschub, Wasserauffangbehälter

- Geben Sie saubere und feuchte Kompressen in den Regal-Einschub im Kompressenwärmer, schliessen Sie die Tür und stecken Sie den Netzstecker ein
- Schalten Sie den An/Aus-Schalter auf „ON“, so dass die Betriebslampe leuchtet
- Berücksichtigen Sie eine Aufwärmzeit von ca. einer Stunde, wenn Sie das Gerät in Betrieb nehmen
- Schalten Sie nach dem Betrieb den Netzschalter wieder auf Position AUS („OFF“)
- Leeren Sie den Wasserauffangbehälter in regelmäßigen Abständen

Teilebezeichnung

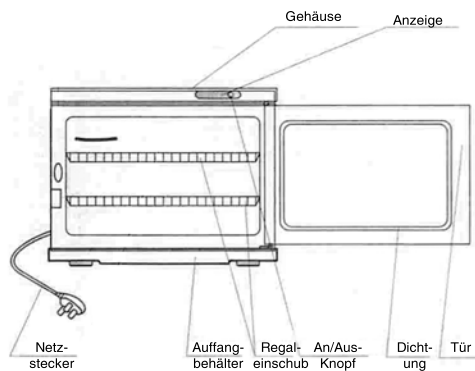

Frontansicht (Tür geöffnet)

Bodynova GmbH

Scheidweiler Strasse 19

50933 Koeln

Germany

Tel.: +49 (0)221 356635 - 0

<http://www.bodynova.de>