

Vapozone portable (MB55 / F-101)



Mode d'emploi :

Action

1. Ramolli les cellules mortes de la peau et prépare la peau de manière optimale au soin correspondant.
2. Ouvre les pores pour un nettoyage en profondeur.
3. La vapeur pénètre en profondeur dans les pores et nettoie les impuretés, le gras, les points noirs et les restes de maquillage.
4. La vapeur peut aider à éliminer les toxines de l'épiderme.
5. Action hydratante, stimule la circulation et le métabolisme et active la régénération cellulaire.
6. Grace à son action hydratante, la vapeur peut avoir une action positive passagère sur les rides du visage.

Application

1. Connectez le bras du vapozone et la tête vaporisante à l'appareil.
2. Ouvrez le réservoir à eau (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre "LOOSEN") et remplissez d'eau distillée. La contenance doit se trouver entre les marques "MIN" et "MAX" .
Fermez le réservoir à eau (dans le sens des aiguilles d'une montre "FASTEN").
3. Pour une vaporisation d'arômes, poussez le couvercle du dépôt d'arômes avec le poussoir, la tête vaporisante vers l'extérieur et instillez quelques gouttes d'huile essentielle dans la petite ouverture du coussin en gel Silica, de manière à ce qu'elles tombent sur le coussinet.
4. Pour échanger le coussinet, poussez le couvercle du dépôt à arômes, poussez la tête vaporisante vers l'extérieur et tirez le coussinet blanc en gel Silica. Enlevez le coussinet en papier non-tissé et

Remplacez-le par un coussinet neuf dans le coussin en gel Silica. Ensuite remplacez-le dans la tête de vaporisation et refermez le couvercle.

5. Allumez l'appareil en appuyant l'interrupteur POWER sur ON. L'appareil est préprogrammé sur 15 min, La lampe à ozone (OZONE) et la lampe vaporisante (VAPOR) sont allumées. Allumez l'interrupteur à vapeur (VAPOR), pour que l'appareil commence à chauffer. Après env. 5 min, la vapeur commence à sortir du vapozone.
6. Allumez l'interrupteur à ozone (OZONE).
 - La lampe à ozone s'allume.
 - La fonction ozone (lumière UV) est ajoutée (l'ozone a une action désinfectante et stimule La guérison des plaies).
 - Vous pouvez reconnaître à l'odeur si la fonction ozone est bien active.
7. Pendant le soin, l'eau contenue dans le réservoir à eau est continuellement vaporisée. Dès que le niveau de l'eau a atteint son la marque "MIN", un signal sonore d'alarme est émis. L'appareil ne chauffe plus et la minuterie affiche automatiquement "0". Éteignez svp toutes les fonctions, ainsi que l'appareil lui-même et retirez le câble du branchement électrique. Nun können Sie erneut destilliertes Wasser in den Wassertank einfüllen und das Gerät wieder in Betrieb nehmen um die Behandlung fortzusetzen.

Conseils d'application

Type de peau	Intervalle	Durée
Peau grasse, mauvaise circulation	25 cm	ca. 15 Min.
Peau normale	25 cm	10 Min.
Peau sèche et sensible	30 cm	5 Min.
Vaisseaux élargis (couperose), coups de soleil	30 cm	5 Min.

Mesures de sécurité

1. Soyez certain que l'appareil est placé de manière stable et sûre.
2. Évitez de mouiller le boîtier de l'appareil pour prévenir tout dommage et danger.
3. Veillez à ne pas visser le réservoir à eau trop fort. Le réservoir étant en plastique, il pourrait se fissurer ou se casser.
4. En cas de fuite d'eau ou de vapeur du réservoir à eau, éteignez immédiatement l'appareil, dévissez le réservoir, débranchez du courant et vérifiez si la bague d'étanchéité est bien mise. Si besoin, Repositionnez-la correctement. Si la fuite persiste, contactez svp notre service client au n° de tel 03 20 76 02 09.
5. N'orientez pas la tête vaporisante vers lae visage de la cliente avant que la vapeur ne sorte de manière régulière. Veillez à garder une distance de minimum 40 cm au visage et commencez l'application en partant du menton. Ensuite, traitez le reste du visage.

6. L'application d'ozone pouvant éliminer les bactéries présentes naturellement sur la peau, veillez à ne pas dépasser les durées d'application correspondantes aux types de peaux.
7. Pendant le traitement, observez bien le niveau de l'eau du réservoir à eau. Dès que le niveau est atteint la marque minimum („MIN“), un signal sonore d'alarme est émis. L'appareil s'arrête alors de chauffer et le compteur se met automatiquement sur "0". Éteignez tout de suite toutes les fonctions, ainsi que l'interrupteur principal de l'appareil et débranchez le câble de courant.
Vous pouvez alors de nouveau remplir le réservoir d'eau distillée et remettre l'appareil en marche pour continuer le soin.

Avertissement

1. Ne pas verser de liquides huileux et gras dans le réservoir à eau.
2. Pour éviter les brûlures, la tête vaporisante ne doit pas être orientée directement vers le visage ou être tenue par-dessus la peau.
3. Le vapozone ne doit pas être disposé dans des pièces humides (salle de bains etc.).
4. Le vapozone ne doit pas être utilisé sous les rayons du soleil pour une durée prolongée.
5. Il est défendu d'ouvrir l'appareil de son propre chef. En cas de problèmes ou d'irrégularités, contactez Svp votre service client au 03.20.76.02.09.

Maintenance

Nettoyez le réservoir à eau et les éléments chauffants une fois par semaine minimum à l'aide d'un tissu propre, sec et ne peluchant pas.

Garantie et service

La garantie du fabricant pour le vapozone est de 2 ans à compter de la date d'achat sur les défauts de fabrication et de matériau.

Sont exclus de la garantie tous les dommages dus au transport, à une utilisation inadéquate, à un accident, ou sous l'effet d'une nuisance externe.

Le vapozone mobile est muni de préventions de sécurité. Toute manipulation à l'appareil effectuée sous initiative personnelle conduit à l'expiration de toute garantie.

En cas de réclamation, contactez-nous par tel au 03 20 76 02 09 ou par écrit.



BODYNOVA GmbH, Scheidtweiler Str. 19, 50933 Köln
Tel. +49-(0)221-356635-0, Fax +49-(0)221-356635-20
www.bodynova.de
service@bodynova.de