

Benutzung der klappbaren Armauflage


Die patentierte klappbare Armauflage ermöglicht zusammen mit einer Kopfstütze die optimale Lagerung Ihrer Klienten in der Bauchlage - der gesamte Hals-, Nacken- und Schulterbereich wird entlastet. Besonders auch Klienten mit Problemen in der oberen Wirbelsäule oder ältere Patienten können während der Behandlung bequem und schmerzfrei liegen.

Bedienungsanleitung:


- I. Bringen Sie die verstellbare Kopfstütze am Massagetisch an.
- II. Der Haltegurt der klappbaren Armauflage wird einfach um die Querverstrebung der verstellbaren Kopfstütze herumgeführt. Schließen Sie den Schnellverschluss des Gurtes. Der Winkel der Armauflage kann durch die Länge des Haltegurtes verstellt werden.



Querstrebe der verstellbaren Kopfstütze

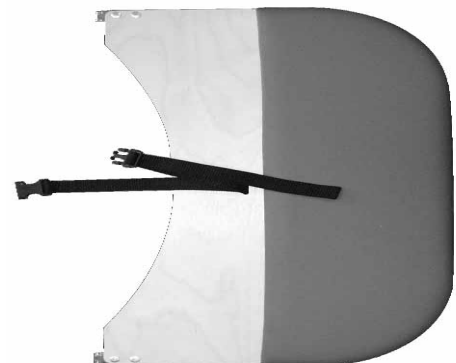

Seitenansicht und Abbildungen der Einzelteile:

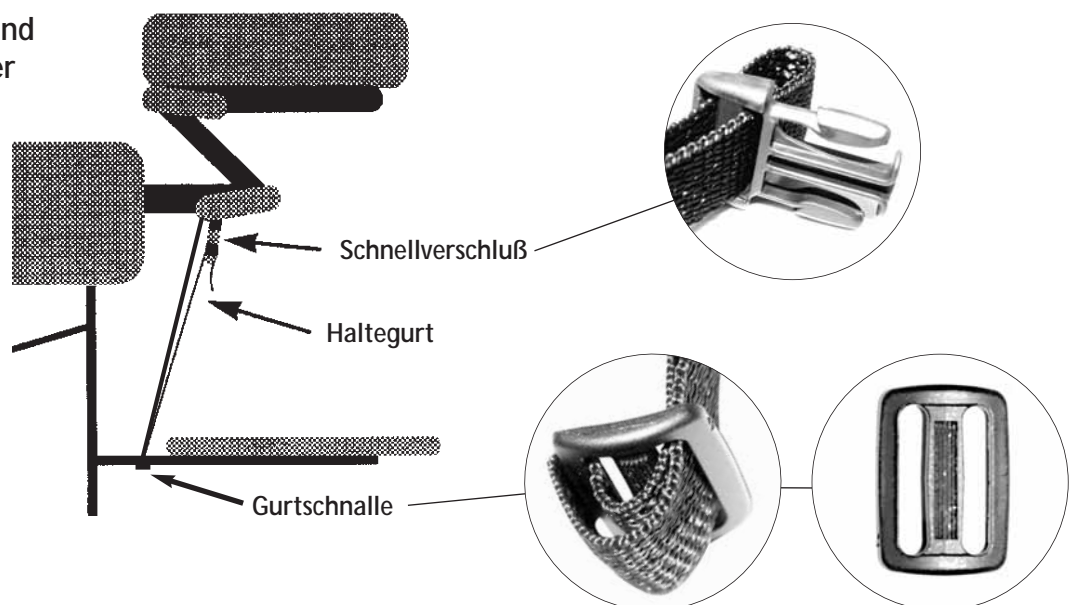

Vorsicht! Die klappbare Armauflage ist nicht für große Belastungen konstruiert; z.B. sollte der Klient sich nicht an der Armauflage abstützen, um sich vom Tisch zu erheben. Durch Überbeanspruchung entstandene Schäden sind nicht durch die Garantie gedeckt.

Bei Rückfragen: BODYNOVA GmbH Massagetische & Praxisbedarf
 Vogelsanger Str. 10 · 50823 Köln
 Tel. 0221-35 66 35-0 · Fax 0221-35 66 35-20 · website: www.bodynova.de