


CLINICIAN - Aufbauanleitung

Liste der Teile

- 8 Unterlegscheiben
- 8 Muttern mit Nylon-Sicherung
- 1 Schraubenschlüssel

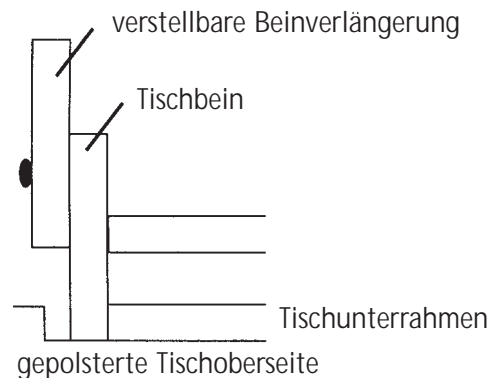

- I. Legen Sie den Tisch mit der Oberseite nach unten auf den Boden.
- II. Legen Sie das Unterregal auch mit der Oberseite nach unten auf die Tischunterseite.
- III. An jeder der Tischecken finden Sie die Nummer des in diese Ecke passenden Tischbeines.
- IV. Schieben Sie den unteren Schraubbolzen des Tischbeines mit der gleichen Nummer durch den Metallwinkel in der dazugehörigen Tischecke.
- V. Schieben Sie den oberen Schraubbolzen des Tischbeines durch den Metallwinkel in der dazugehörigen Ecke des Unterregals.
- VI. Die Metallbolzen werden jeweils mit einer Unterlegscheibe, einem Sternring und der Mutter zuoberst festgeschraubt.
- VII. Wiederholen Sie die Punkte IV.-VI. mit den anderen drei Tischbeinen.
- VIII. Ziehen Sie alle Muttern mit dem beiliegenden Schraubenschlüssel fest an.
Drehen Sie den Tisch um - Ihr OAKWORKS Clinician ist einsatzbereit!

