
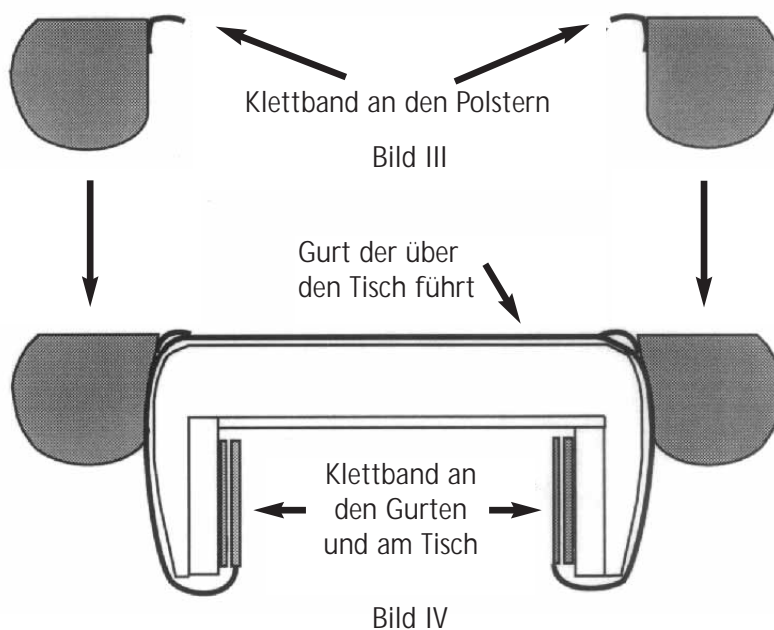
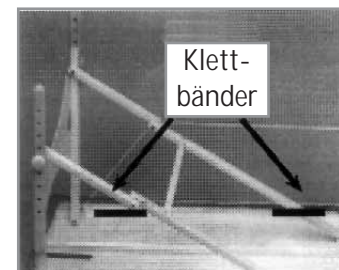


Benutzung der seitlichen Armstützen

Die seitlichen Armauflagen verbreitern Ihren Oakworks Massagetisch um ca. 18 cm und geben Ihren Klienten das Gefühl, wirklich entspannen zu können, die Arme fallen nicht mehr zu den Seiten herab.

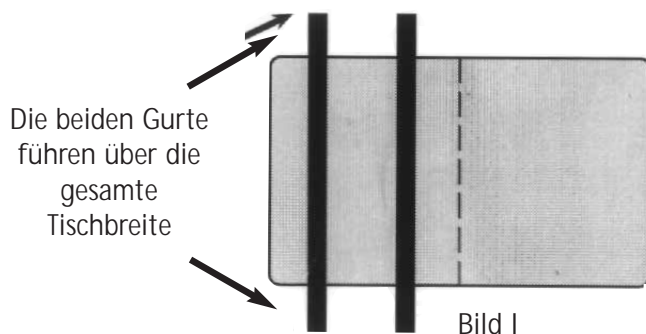

Falls nicht vorhanden, senden wir Ihnen die selbstklebenden Klettbander mit, die unter den Tisch geklebt werden. Halten Sie einfach das Polster mittig neben eine Tischhälfte, dann läßt sich das Klettband einfach im richtigen Abstand auf die Innenseite des Rahmens kleben. (Bild II)

- I. Der Befestigungsgurt wird an den Klettbandstreifen an der Unterseite des Tisches angebracht. (Bild II)
- II. Der Befestigungsgurt wird quer über den Tisch geführt und erneut an den Klettbandstreifen an der Unterseite des Tisches angebracht (Klettband des Gurtes zeigt nach unten). (Bild I + III)
- III. Wiederholen Sie obige Schritte mit dem zweiten Gurt.
- IV. Befestigen Sie das Polster mittels des Klettbands am Gurt. (Bild IV)
- V. Wiederholen Sie Schritt IV. mit dem zweiten Gurt.

Weitere Verwendungsmöglichkeiten: Die Polster können auch als Knierollen oder als Polster unter den Fußgelenken verwendet werden.

Vorsicht: Die seitlichen Armstützen sind nur zur Unterstützung des Armes im Liegen geeignet, nicht jedoch zum Aufstützen beim Aufstehen vom Tisch oder zum Sitzen am Tischrand.